



<p><b>Klinische Pathologie</b></p> <p><b>Serologie</b></p> <p><b>Mo – Fr.: 7<sup>30</sup> bis 16<sup>00</sup></b></p>	 <p><b>LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH</b>  <i>Akademisches Lehrkrankenhaus</i>  <b>Institut für Pathologie</b>  Vorstand: Prim. Univ.-Doz. Dr. Felix Offner</p>	<p>Tel. 05522 303 3440  Fax 05522 303 7584  e-mail <a href="mailto:serologie@lkhf.at">serologie@lkhf.at</a>  home-page: <a href="http://www.lkhf.at">http://www.lkhf.at</a></p> <p>13.07.2016 OA. Dr. G. Hartmann  Biomed. Analytikerin  V. Geiger</p>
---	---	--

## Blutabnahme für QuantiFERON-Tb-Gold-Plus Test

1. **Probenabnahme: Mo – Do;**  
**Probenannahme: Mo – Do: 07:30 bis 16:00**  
**Am Freitag, Samstag, Sonntag und an Werktagen vor einem Feiertag sind keine Probenannahmen möglich!** Proben idealerweise innerhalb von **3 Stunden** ins Labor senden. Innerhalb von **12 Stunden** müssen die Proben eingelangt sein!
2. **Blutröhrchen und Infektionsserologischer Begleitschein (Datum, Uhrzeit) korrekt beschriften.**
3. **Blutabnahme: 0,8 bis 1,2 ml** in jedes der **vier Blutröhrchen** (zur Orientierung schwarze Markierung), Röhrchen bei Raumtemperatur lagern!

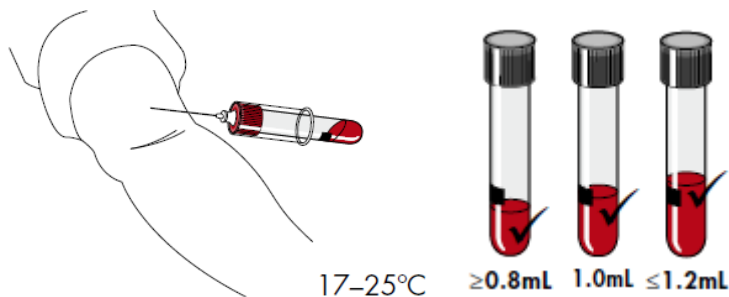

4. **Mischen Sie die Röhrchen durch 10-maliges Kippen**, sodass das an der Röhrcheninnenwand aufgetragene, getrocknete TB-Antigen vollständig mit Blut vermischt wird.  
**Zu heftiges Schütteln kann den Gelpfropf zerstören und zu fehlerhaften Ergebnissen führen!**

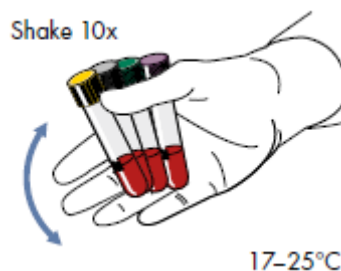

5. **Versand:** Blutröhrchen wie üblich (mit Rohrpost, Hol- und Bringdienst oder Versandtaschen per Post oder Kurier, etc.) verschicken.