


## Inhalt Best. Nr. 148960:

- 1 Zip-Beutel zur Aufbewahrung der Röhrrchen (A)
- 1 großer, verschließbarer Beutel zur Rücksendung (B)
- 3 transp. Röhrrchen mit grüne Deckel mit Flüssigkeit
- 3 grüne Spatel

### Anleitung:


**1**



a) Stuhlprobe in einem sauberen, trockenen Gefäß aufnehmen, ohne Seifenreste oder Desinfektionsmittel (z.B. Plastikfolie, Bettpfanne).

b) **Stuhlprobe nicht vermischen mit Wasser, Urin oder Toilettenpapier.**


**2**

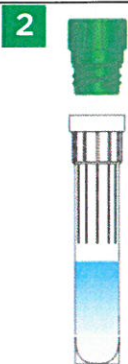

Den Deckel des ersten Röhrrchens abschrauben und vorsichtig auf einer geraden Fläche abstellen, so daß es nicht umkippen kann.



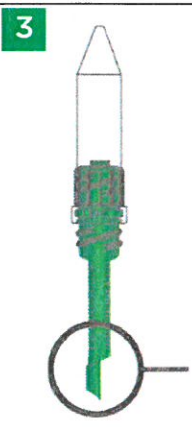

Deckel wegwerfen.

**3**



a) Mit der einen Hand den grünen Spatel nehmen, diesen am transparenten Teil festhalten.

b) Mit dem grünen Spatel etwas Stuhl aus der Mitte der Probe entnehmen, dabei vermeiden, daß Probenreste am Rand des Spatels hängen bleiben (s. Beispiele unten:)

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| <b>Probenmenge RICHTIG</b>  | Spatel mit Stuhlresten aussen <b>FALSCH</b>   |
|  |  |
| Zuviel Probe <b>FALSCH</b>  | Zuviel Probe und Stuhlreste aussen <b>FALSCH</b>                                    |


**4**



a) Den Spatel in das flüssigkeitsgefüllte Röhrrchen stecken und fest zudrehen (**Nicht den transp. oberen Teil entfernen!**). Das Röhrrchen sollte nun aussehen wie in der Abbildung links.

b) Das verschlossene Röhrrchen mit der Probe in Beutel A stecken und bei Raumtemperatur aufbewahren. Dabei darauf achten, daß es bis zur Rückgabe ans Labor aufrecht steht.. Bitte nicht einfrieren oder in den Kühlschrank stellen.

**5**

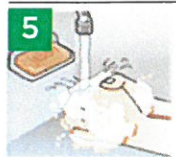

Sorgfältig die Hände mit Seife waschen.

**6** Wenn es notwendig ist bzw. angeordnet wurde, kann die Probenahme an insgesamt 3 aufeinander folgenden Tagen durchgeführt werden, dazu die Schritte 1-5 wiederholen.

**7** Wenn die Probe versandt oder abgeholt werden soll, den/die Beutel "A" in den großen Beutel "B" stecken, den Klebestreifen entfernen und den Rand umfalten. Fest zurdrücken, damit der Beutel sicher verschlossen ist. Den Beutel versenden oder weitergeben wie vom Labor vorgeschrieben.

**WICHTIG**



**NICHT TRINKEN**

Die Flüssigkeit in den Röhrrchen ist giftig (SAF Lösung). Nicht trinken. Von Kindern fernhalten.  
 Bei Kontakt mit Augen, Haut oder Schleimhäuten sofort mit viel Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.