



Blutabnahme für QuantiFERON-Tb-Gold-Plus Test

- Probenannahme: Mo – Do: 07:30 bis 15:30 Uhr**
CAVE: KEINE Probenannahme am 24.12., 31.12. und Karfreitag! Am Faschingsdienstag ist das Labor nur bis 11:30 besetzt!
- Am Freitag, Samstag, Sonntag und an Werktagen vor einem Feiertag ist keine Probenannahmen möglich!** Proben müssen am Tag der Blutentnahme bis spätestens 15:30 Uhr im Labor eingelangt sein. Bei späterem Einlangen ggf. keine Bearbeitung möglich.
- Blutröhrchen und Infektionsserologischen Begleitschein korrekt beschriften.**
CAVE: ohne Angabe des Entnahmedatums und -uhrzeit keine Bearbeitung!
- Verfallsdatum aller vier Röhrchen prüfen:** nach Ablauf des Verfallsdatums KEINE Bearbeitung! Bitte Patientenetiketten so aufkleben, dass das Verfallsdatum sichtbar bleibt.
- Blutabnahme:** 0,8 bis 1,2 ml in jedes der **vier Blutröhrchen** (zur Orientierung schwarze Markierung), Röhrchen bei Raumtemperatur lagern!

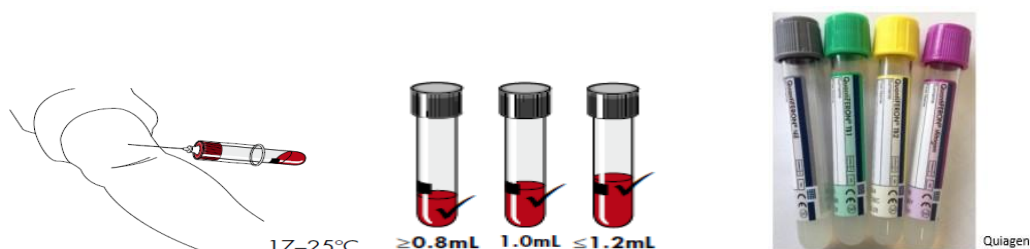

- Mischen Sie die Röhrchen durch 10-maliges Kippen**, sodass das an der Röhrcheninnenwand aufgetragene, getrocknete TB-Antigen vollständig mit Blut vermischt wird.

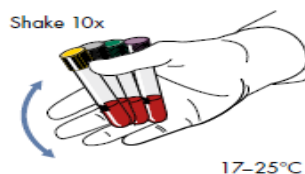

- Versand:** Blutröhrchen wie üblich (mit Rohrpost, Hol- und Bringdienst oder Versandtaschen (grüne Beschriftung, „Quantiferon“-Kennzeichnung) per Post oder Kurier, etc. verschicken.



- Nachfragen bitte schriftlich an serologie@lkhf.at oder unter der Telefonnummer **+43 5522 303 3440**.
- Materialbestellung über das Formular [Materialanforderungsschein](#)

Erstellt am: 22.01.2026	Version: 3
Erstellt von: Carolin Thurnher	
Freigegeben von: Richard Reicher	Seite 1 von 1